

STOCKAGE ET MANIPULATION:

Conserver à une température inférieure à 25oC. Éviter la chaleur excessive.

DURÉE DE CONSERVATION:

Le spray SureKlot a une durée de conservation de 2 ans.

CAPACITÉS DISPONIBLES :

- 30 ml - SKVS30
- 100 ml- SKVS100



Si vous avez des questions ou des commentaires sur le produit, veuillez contacter le service d'assistance téléphonique Axio Biosolutions à l'adresse care@axiobio.com ou au numéro +91 8860786067

	Tenir éloigné de la lumière du soleil
	Maintenir au sec
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Date de fabrication
	Date d'expiration
	Numéro de lot

SSYF/EU/14/03/22/Rv/00

SureTM
Klot
SPRAY

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

 **AXIO**[®]

Fabriqué par:

Axio Biosolutions Private Limited
Plot 18, Gujarat Pharma Techno Park
Sari Matoda, Sanand Taluka
Ahmedabad-382220, Gujarat, India.

Mfg License no: MFG/MD/2020/000102

Customer Care: +91 88607 86067

Email: info@axiobio.com | Web: www.axiobio.com

SUREKLOT™

DESCRIPTION DU DISPOSITIF:

Le spray SureKlot est un liquide clair, non visqueux et presque inodore destiné à être utilisé pour le nettoyage et l'hydratation des plaies vétérinaires externes. L'action nettoyante de la solution contribue à l'élimination des matières étrangères telles que la saleté et les débris de la surface de la plaie.

ACTION:

La formule du Sureklot Spray à base de chitosan et de polyhexaméthylène biguanide nettoie la plaie et élimine en douceur les escarres, les tissus nécrosés ou morts, les débris étrangers et la partie résiduelle du pansement. Elle possède une forte action nettoyante, tout en étant douce pour la surface de la plaie, et crée un environnement optimal pour le traitement de la plaie. Il facilite aussi efficacement le processus de débridement de la plaie. Il est non cytotoxique, non irritant et ne tache pas.

ACTION/BENEFITS:

The SureKlot™ Spray formula of chitosan and PHMB cleans the wound and gently removes biofilm. It has strong cleansing action, yet is gentle on the wound surface, and creates the optimum environment for wound management. It effectively removes foreign materials, dirt and facilitates the wound debridement process. It is non-cytotoxic, non-irritant and non-staining.

INGRÉDIENTS :

Lactate de chitosan dans une base aqueuse, 0,1 % de polyhexaméthylène biguanide (PHMB).

UTILISATION PRÉVUE:

Le Spray SureKlot est destiné au nettoyage et à l'hydratation des plaies vétérinaires externes. Il aide également au débridement autolytique et protège les plaies contre les infections microbiennes externes.

INDICATION D'UTILISATION:

Le spray SureKlot est indiqué pour la prise en charge des plaies externes vétérinaires chroniques et aiguës. Il peut être utilisé pour nettoyer les plaies et pour humidifier et lubrifier les pansements absorbants des plaies suivantes .

- Plaies vétérinaires infectées ou présentant un risque accru d'infections.
- plaies infestées d'asticots
- Dermatomycose
- Plaie nécrotique
- Les escarres de décubitus
- Ulcères de jambe
- Les plaies cavitaires
- Les plaies traumatiques et chirurgicales.
- Pourriture du pied
- Blessure par brûlure
- Coupures, contusions et abrasions mineures.

MODE D'EMPLOI:

1. Rincez la plaie avec une quantité suffisante du spray SureKlot pour la nettoyer et la rincer.
2. Pour les plaies fortement contaminées : Couvrez la plaie avec le spray SureKlot pendant 10 à 15 minutes, en utilisant un pansement standard saturé de spray SureKlot.

AVERTISSEMENTS:

- Pour un usage vétérinaire externe uniquement.
- Utiliser dans les 28 jours suivant l'ouverture.
- Ne pas appliquer sur les yeux, les muqueuses.
- Si la rougeur, l'irritation ou le gonflement persistent ou augmentent, arrêter l'utilisation et consulter un vétérinaire.